

Obsah:

- 1) Čo je NOZITIX® a na čo sa používa
- 2) Dôležité informácie pred použitím nosovej aerodisperzie NOZITIX®
- 3) Ako sa NOZITIX® používa
- 4) Možné vedľajšie účinky
- 5) Ako sa NOZITIX® uchováva
- 6) Ďalšie informácie

Zloženie: čistená voda, čistený olivový olej, glycerol, laktoferín, disodná soľ kyseliny 18-β-glyrrhizovej, olej z perily krvitej, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, vitamín E (DL-alfa-tokoferol acetát), totarol, hydrogénfosforečnan sodný, mäťový olej, olej z jedle sibírskej, disodná soľ EDTA, eukalyptový olej.

1) Čo je NOZITIX® a na čo sa používa

NOZITIX® je nosová aerodisperzia na báze prírodných olejov, ktorá poskytuje úľavu od nepríjemných pocitov a suchosti v oblasti nosovej sliznice, ktoré môžu byť spôsobené pobytom v prekurých či klimatizovaných priestoroch, pri cestovaní lietadlom, pri terapii kyslíkom alebo pri používaní nazálnych kortikosteroidov.

NOZITIX® napomáha pri prevencii a liečbe nádchy a zápalu nosa vírusového, bakteriálneho alebo alergického pôvodu. Éterický mäťový olej a kyselina glycyrrhizová obsiahnuté v prípravku navyš znižujú opuch nosovej sliznice.

NOZITIX® sa rozptyľuje vo forme tixotropnej emulzie, ktorá v mieste aplikácie zaistí vytvorenie tenkého, mäkkého, ochranného filmu. Vďaka tixotropným vlastnostiam sa emulzia rovnomerne nanáša a nesteká z povrchu nosovej sliznice. Predlžuje sa tým kontakt nosovej sliznice so všetkými zložkami prípravku, čím dochádza k tvorbe výrazne silnejšej ochrannej hydratačnej vrstvy ako tomu býva pri klasických nosových instiláciách.

2) Dôležité informácie pred použitím nosovej aerodisperzie NOZITIX®

Kontraindikácie a upozornenia

Aerodisperziu nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

- ak je obal aerodisperzie poškodený;
- ak máte alergiu na ktorúkoľvek zložku aerodisperzie;
- ak uplynul čas použiteľnosti uvedený na obale;
- pokiaľ krváca z nosa alebo máte poranený nos;
- pokiaľ ste bezprostredne po operácii resp. chirurgickom zákroku v ústach alebo v nosohltane;
- u detí mladších ako 3 roky.

Vzájomné pôsobenie s ďalšími liekmi / zdravotníckymi pomôckami

Neboli zistené žiadne interakcie s inými liekmi / zdravotníckymi pomôckami, aj tak by sa však počas 30 minút po podaní aerodisperzie nemali používať žiadne iné lieky / zdravotnícke pomôcky instilácie do nosa.

3) Ako sa NOZITIX® používa

Pred prvým použitím: Novú fľaštičku aerodisperzie NOZITIX® najskôr zahrejte v dlani, **potrepte** po dobu 15 sekúnd (viď. obrázok A), odstráňte plastový uzáver (viď. obrázok B) a 3- až 4-krát stlačte dávkovač, pokiaľ nevystrekne emulzia (viď. obrázok C). Trysku dávkovača pritom držte smerom od seba. Týmto postupom je aerodisperzia pripravená na použitie.

Dodržiavaním nasledujúcich pokynov najlepšie využijete účinky aerodisperzie:

Pred použitím si vyfúkajte nos. Zahrejte fľaštičku v dlani a potrepte po dobu 15 sekúnd (viď. obrázok A). Z fľaštičky odstráňte plastový uzáver (viď. obrázok B). Ukazovák a prostredník priložte na dávkovač a odspodu pridržte fľaštičku palcom (viď. obrázok C).

Vložte aplikátor do nosovej diery a stlačte (viď. obrázok D). Tento postup zopakujte aj v druhej nosovej diere. Po použití dôkladne očistite aplikátor a uzavrite ho plastovým viečkom. Po použití aerodisperzie nepoužívajte ani nevyplachujte nos žiadnym iným liekom alebo tekutinou počas nasledujúcich 30 minút. Jedno balenie je určené iba pre jednu osobu. NOZITIX® používajte výhradne na lokálnu aplikáciu do nosa.

Zanesenie aplikátora nie je pravdepodobné. Pokiaľ by predsa len došlo k obmedzeniu jeho priechodnosti prerušením každodenného používania, vyberte dávkovač a umyte ho pod tečúcou teplou vodou. Pred ďalším použitím musí byť z aplikátora odstránená všetka voda, preto dodržiavajte rovnaké pokyny ako pred prvým použitím.


Aerodisperziu NOZITIX® je možné používať 6 mesiacov odo dňa prvého použitia.

Dávkovanie

Deti vo veku od 3 do 12 rokov: 1 dávka do každej nosovej diery 2- až 3-krát denne. Používajte jedine pod dohľadom dospeljej osoby. Pokiaľ po 14 dňoch nedôjde k zlepšeniu alebo sa osoba cíti horšie, poraďte sa s lekárom.

Dospelí a deti od 12 rokov: 1 dávka do každej nosovej diery 3- až 4-krát denne. Pokiaľ po 14 dňoch nedôjde k zlepšeniu alebo sa osoba cíti horšie, poraďte sa s lekárom.

NOZITIX® obsahuje približne 200 jednotlivých dávok.

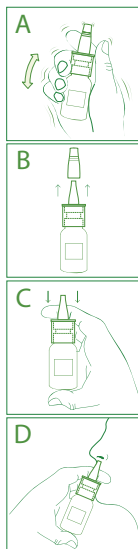

4) Možné vedľajšie účinky

Zdravotnícka pomôcka NOZITIX® je dobre tolerovaná a nie sú známe žiadne vedľajšie účinky po jej použití. Pri výskyte príznakov alergickej reakcie alebo iných vedľajších účinkov je potrebné informovať lekára alebo lekárničku. Zdravotnícku pomôcku NOZITIX® je nutné používať podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

5) Ako sa NOZITIX® uchováva

Aerodisperziu NOZITIX® uchovávajte:

- na suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C, vo zvislej polohe;
- chráňte pred mrazom, neuchovávajte v chladničke;
- mimo dosahu priameho slnečného žiarenia;
- mimo dohľadu a dosahu detí.

Po spotrebovaní zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

6) Ďalšie informácie

NOZITIX® je zdravotnícka pomôcka triedy I.

Balenie

Fľaštička s mechanickým dávkovačom obsahuje 10 ml roztoku.

Výrobca

Tanacetum s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika

Distribútor v SR: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika

Vysvetlenie použitých symbolov

15°C - 25°C
obmedzenie prípustnej skladovacej teploty

pred použitím zdravotníckej pomôcky si prečítajte návod na použitie

výrobca

CE značka zhody CE

upozornenie

chráňte pred slnkom

nepoužívajte v prípade poškodenia obalu

LOT číslo šarže

čas použiteľnosti

Obsah:

- 1) Co je NOZITIX® a k čemu se používá
- 2) Důležité informace před použitím spreje NOZITIX®
- 3) Jak se NOZITIX® používá
- 4) Možné nežádoucí účinky
- 5) Jak se NOZITIX® uchovává
- 6) Další informace

Složení: čišťená voda, čistý olivový olej, glycerol, laktoferin, disodná sůl kyseliny 18-β-glycyrrhizové, olej z perily křovité, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, vitamin E (DL-alfa-tokoferyl acetát), totarol, hydrogenfosforečnan sodný, máťový olej, olej z jedle sibiřské, EDTA disodná sůl, eukalyptový olej.

1) Co je NOZITIX® a k čemu se používá

NOZITIX® je nosní sprej na bázi přírodních olejů, který poskytuje úlevu od nepříjemných pocitů a suchosti v oblasti nosní sliznice, které mohou být způsobeny pobytem v přetopených či klimatizovaných prostorách, při cestování letadlem, terapií kyslíkem nebo při používání nosních kortikosteroidů. NOZITIX® napomáhá při prevenci a léčbě rýmy a nosních zánětů virového, bakteriálního nebo alergického původu. Éterický máťový olej a kyselina glycyrrhizová obsažené v přípravku navíc snižují otok nosní sliznice.

NOZITIX® se rozptýluje ve formě tixotropní emulze, která v místě aplikace zajistí vytvoření tenkého, měkkého, ochranného filmu. Díky tixotropním vlastnostem se emulze rovnoměrně nanáší a nestéká z povrchu nosní sliznice. Prolužuje se tak kontakt nosní sliznice se všemi složkami přípravku, čímž vzniká výrazně silnější ochranná a hydratační vrstva, než jak tomu bývá u běžných nosních kapek.

2) Důležité informace před použitím spreje NOZITIX®

Kontraindikace a upozornění

Nepoužívejte sprej v následujících případech:

- je-li obal spreje poškozený;
- pokud máte alergii na kteroukoliv složku spreje;
- pokud uplynulo datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu;
- pokud krvácíte z nosu nebo máte poraněný nos;
- pokud jste bezprostředně po operaci nebo chirurgickém zákroku prováděném v ústech nebo nosohltanu;
- u dětí mladších 3 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky / zdravotnickými prostředky

Nebyly zjištěny žádné interakce s jinými léčivými přípravky / zdravotnickými prostředky, nicméně, po dobu 30 minut po aplikaci spreje by neměly být používány žádné jiné léčivé přípravky / zdravotnické prostředky / kapky do nosu.

3) Jak se NOZITIX® používá

Před prvním použitím: Novou lahvičku spreje NOZITIX® nejprve zahřejte v dlaní, **protřeptejte** po dobu 15 sekund (viz obrázek A), sundejte plastový uzávěr (viz obrázek B) a 3-4x stiskněte dávkovač, dokud nevystříkne emulze (viz obrázek C). Tryskový dávkovač přitom držte směrem od sebe. Tímto postupem je sprej připraven k použití.

Dodržováním následujících pokynů nejlépe využijete účinků preparátu:

Před použitím se vysmrkejte. Zahřejte lahvičku v dlaní a protřeptejte po dobu 15 sekund (viz obrázek A). Z lahvičky sundejte plastový uzávěr (viz obrázek B). Ukazováček a prostředníček přiložte na dávkovač a zespuďu přidrřžte lahvičku palcem (viz obrázek C). Vložte aplikátor do nosní díry a stiskněte (viz obrázek D). Tento postup opakujte i ve druhé nosní díře. Po použití důkladně očistěte aplikátor a uzavřete ho plastovým víčkem. Po aplikaci preparátu nepoužívejte ani nevyplachujte nos žádným jiným přípravkem nebo tekutinou po dobu 30 minut. Jedno balení je určeno pouze pro jednoho pacienta. NOZITIX® používejte výhradně k lokální aplikaci do nosu.

Zanesení aplikátoru není pravděpodobné. Pokud by přeci jen došlo k jeho omezené průchodnosti, způsobené přerušením každodenního používání, vyjměte dávkovač a omyjte ho pod teplou tekoucí vodou. Před dalším použitím musí být z aplikátoru odstraněna všechna voda, proto dodržte stejné pokyny pro postup přípravy jako před prvním použitím. Sprej NOZITIX® lze používat po dobu až 6 měsíců ode dne prvního použití.

Dávkování

Děti od 3 do 12 let věku: 1 dávka do každé nosní díry 2-3 x denně. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Pokud po 14 dnech nedojde ke zlepšení nebo se pacient cítí hůř, poraďte se s lékařem.

Dospělí a děti nad 12 let: 1 dávka do každé nosní díry 3-4 x denně. Pokud po 14 dnech nedojde ke zlepšení nebo se pacient cítí hůř, poraďte se s lékařem.

NOZITIX® obsahuje přibližně 200 jednotlivých dávek.

4) Možné nežádoucí účinky

Zdravotnický prostředek NOZITIX® je dobře snášen a nejsou známé žádné nežádoucí účinky po jeho použití. Při výskytu příznaků alergické reakce nebo jiných nežádoucích účinků je nutné informovat lékaře nebo lékárníka. Zdravotnický prostředek NOZITIX® je nutné používat pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

5) Jak se NOZITIX® uchovává

Výrobek NOZITIX® uchovávejte:

- na suchém místě při teplotě 15 - 25 °C, ve svislé poloze;
- chraňte před mrazem, neuchovávejte v chladničce;
- mimo dosah přímého slunečního záření;
- mimo dohled a dosah dětí.

Po spotřebování zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

6) Další informace

NOZITIX® je zdravotnický prostředek třídy I.

Balení

Lahvička s mechanickým dávkovačem obsahující 10 ml roztoku.

Výrobce
Tanacetum s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Česká republika

Distributor v ČR: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika

Vysvětlení použitých symbolů



omezení přípustné skladovací teploty



před použitím zdravotnického prostředku si přečtěte návod k použití



výrobce



značka shody CE



upozornění



chráňte před sluncem



nepoužívejte v případě poškození obalu



číslo šarže



minimální trvanlivost do